



# HOFFMANN'S KOPAL LACK

---

## Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

**Zusammensetzung:** Kopallack enthält: Kopal, Ethanol

**Anwendungsgebiete:** Schutzlack für die Oberflächen von Zementfüllungen, Schutzlack für Gipsmodelle

**Besondere Hinweise:** Hoffmann's Kopal Lack soll bei bekannter Allergie gegen seine Inhaltsstoffe nicht verwendet werden. Kontakt mit Haut und Schleimhaut ist zu vermeiden

**Verarbeitung:** Hoffmann's Kopal Lack wird mit einem Einmalpinsel, einem Schaumstoff- oder Wattepellet aus der Flasche entnommen und auf die zu schützenden Flächen dünn aufgetragen. Die Applikation hat unmittelbar nach Abnahme der Formhilfe zu erfolgen. Der Lack wird in dünner Schicht aufgetragen und mittels milder Druckluft getrocknet. Eine zweite Lage des Schutzlackes wird erst nach vollständigem Trocknen der ersten Schicht appliziert.

**Verarbeitungszeit:** ca. 30 Sekunden

**Trocknungszeit:** ca. 30 Sekunden

**Hinweise:** Um den Lackfilm nicht zu beschädigen, soll der Patient 1 Stunde lang nichts essen.

Die Flasche ist stets sorgfältig verschlossen zu halten.

Kein Kontakt mit offenem Feuer.

**Packungsgröße:** Flasche mit 50 ml

### Hoffmann's Kopal Lack

- dient nur dem zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch
- ist nach Ablauf der angegebenen Verwendbarkeitsdauer nicht mehr einzusetzen

---

**HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH**, Wangenheimstraße 37/39,  
14193 Berlin, Germany, [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)



# HOFFMANN'S COPAL VARNISH

---

## Instruction for the dentist

**Composition:** copal varnish contains: copal, ethanol

**Areas of Application:** Protective varnish for the surface of cement fillings and plaster models

**Special information:** Hoffmann's Copal varnish should not be used in the event of known allergies to its components. Avoid contact with skin and mucous membranes.

**Dispensing Instructions:** Take varnish from bottle with disposable brush, plastic or cotton pellet and apply thinly to the surfaces to be protected. Application must be made immediately after removing the shaping aid. The varnish must be applied in a thin layer and dried with a gentle air stream. A second layer may be applied after the thorough drying of the first.

**Working Time:** Approx. 30 seconds

**Drying Time:** Approx. 30 seconds

**Notes:** In order to prevent damage to the varnish film, the patient must not eat for 1 hour after application.

Keep bottle tightly closed at all times.

Avoid contact with open flame.

**Package Sizes:** 50 ml bottle

### Hoffmann's Varnish

- For dental and dental laboratory use only
- Do not use after the expiration date

---

**HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH**, Wangenheimstraße 37/39,  
14193 Berlin, Germany, [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)