



## HOFFMANN'S SCHELLACK BASISPLATTEN rosa

---

### Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt/ Zahntechniker

**Zusammensetzung:** Basisplatten enthalten: Schellack, Stearin, Talkum, Glimmer

**Anwendungsgebiete:** individueller Abdrucklöffel, Modellarbeiten

**Verarbeitungsempfehlung:** Die Basisplatte wird mit fächernder Flamme erweicht und mit den Fingern auf das Gipsmodell gedrückt. Überflüssige Masse wird, solange sie noch weich ist, mit einer Schere abgeschnitten. Daraufhin wird die Platte nochmals erweicht und die noch nicht anliegenden Stellen gut angedrückt.

**Hinweise:** Niemals eine nicht genügend erwärmte Basisplatte auf das Gipsmodell drücken, es könnte beschädigt werden.

### Packungsgrößen:

**Normalpackungen mit je 12 Platten:**

Oberkiefer 12 Platten 100 g

Unterkiefer 12 Platten 80 g

Sortiert 8 Platten Oberkiefer / 4 Platten Unterkiefer 92 g

**Laborpackungen mit je 100 Platten:**

Oberkiefer 100 Platten 850 g

Unterkiefer 100 Platten 685 g

Sortiert 50 Platten Oberkiefer / 50 Platten Unterkiefer 765 g

### Hoffmann's Basisplatten

- nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden

---

**HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH**, Wangenheimstraße 37/39,  
14193 Berlin, Germany, [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)



## HOFFMANN'S SHELLAC BASE PLATES pink

---

### Instruction for the dentist/ dental technician

**Composition:** base plates contain: shellac, stearin, talcum, mica

**Area of Application:** Individual impression trays, modelling work

**Processing Recommendation:** Soften the base plate with a fanned flame and press onto the plaster cast with your fingers. Excess material can be removed with scissors while soft. Soften the plate again and press the edges into place.

**Notes:** To prevent possible damage, never press an insufficiently heated base plate onto a plaster cast.

### Available Package Sizes:

**Standard size containing 12 plates:**

upper jaw - 12 plates, 100 g

lower jaw - 12 plates, 80 g

assorted - 8 upper jaw / 4 lower jaw plates, 92 g

**Laboratory size containing 100 plates:**

upper jaw - 100 plates, 850 g

lower jaw - 100 plates, 685 g

assorted - 50 upper jaw / 50 lower jaw plates 765 g

### Hoffmann's Base Plates

- Do not use after the expiry date

---

**HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH**, Wangenheimstraße 37/39,  
14193 Berlin, Germany, [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)